

사용시 주의사항

전문가 사용

1. 본 제제는 반드시 체외 진단용으로만 사용합니다. (전문가 사용)
2. 본 제제는 잘못된 검사방법과 결과판독은 잘못된 검사결과를 유발할 수 있으므로 제품 설명서를 숙지한 후, 실험을 진행해야 합니다.
3. 보관 중인 검사용 디바이스가 습기에 노출되면 제품의 성능이 저하될 수 있으므로 사용 직전에 개봉합니다.
4. 유효기간은 패키지에 표기되어 있으며, 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.
5. 파우치가 손상을 입었거나 봉인이 파손된 경우 제품을 사용하지 않는다.
6. 습기, 직사광선 및 열을 피하여 실온에서 보관합니다.
7. 제품과 구성품은 냉동시키지 않는다.
8. 제품과 구성품은 재사용하지 않는다.
9. 전문가 사용
 - 가. 정확한 결과를 얻으려면 사용방법을 정확히 따라야 한다.
 - 나. 해당 제품의 사용자는 관련 교육을 받아야 하며 실험실 절차에 대한 경험이 있어야 한다.
10. 검체 취급할 때, 음식물 섭취나 흡연을 하지 않습니다.
11. 검체 취급 시에는 일회용 비닐장갑 등을 착용하고, 취급 후에는 손을 깨끗이 닦습니다.
12. 시약이나 검체가 주변에 묻지 않도록 주의합니다.
13. 다른 검체와 혼합하여 사용하지 않습니다.
14. 실험이 끝난 후 사용했던 검체, 반응 시약 또는 오염 가능한 물질은 감염성 폐기함에 수거하여 폐기합니다.
15. 제품과 구성품에 의한 교차 오염과 시험 폐기물에 의한 생물학적 오염을 주의한다. 잠재적으로 오염된 물질은 사용 후 즉시 용기에 폐기해야 한다.
16. 본 제제에 포함된 검체 희석액에는 보존제로서 아지드화나트륨이 포함되어 있으므로 일부가 눈이나 입에 들어가거나 피부에 닿은 경우에는 즉시 흐르는 물로 충분히 씻어내고 필요하다면 의사의 치료를 받습니다.
17. 검사용 디바이스에 표시된 대조선 (C) 및 검사선 (T)과 C, 1, 2 를 혼동하여 판독할 우려가 있으므로 결과 판독 시 대조선 (C)과 검사선 (T)만을 판독한다.
18. 시험 검체가 본 제제의 검출할 수 있는 수보다 적은 균수를 가지고 있거나 비특이 반응에 의하여 위양성, 위음성 결과의 가능성을 배제할 수 없으므로 본 제제의 결과만을 기초로 최종진단을 내려서는 안 되며 다른 검사방법과 임상소견에 근거한 전문의의 판단에 의하여 최종진단을 내려야 합니다.